



T.C.
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

CİHAZ KULLANMA TALİMATI (PULSE-OKSİMETRE CİHAZI)

Kod: TY.TL.33

Yayın Tarihi:15.12.2020

Revizyon No:

Revizyon Tarih:

S.N:1/1

AMAÇ: Bu talimat Merkezimizin, bulunan parmak tipi pulse oksimetre aletinin doğru ve güvenli bir biçimde kullanılmasını tanımlamaktır. Bu talimat; parmak tipi pulse oksimetre aleti ile yapılacak olan ölçümleri kapsar..

CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihazı, LCD ekran yukarı gelecek şekilde konumlandırın.
- Parmağınızı, tırnak yukarı gelecek şekilde konumlandırın.
- Cihazı mandal gibi açın ve parmağınızı cihazın içine yerleştirin.
- Butona basın ve cihaz çalıştıktan sonra değerleri ekrandan izleyin.
- Cihazı hangi parmakta kullandığınız önemli değildir. Pulse oksimetreler genellikle işaret parmağında kullanılır. İşaret parmağında yara veya şekil bozukluğu varsa diğer parmaklarda da kullanılabilir.
- Parmak doğru bir şekilde cihaza yerleştirilmezse ölçüm sonuçları yanlış olabilir.
- Cihazı açıp parmağınızı cihaza yerleştirmesiniz, ekranda “Finger Out” uyarısı görünür ve cihaz 1-2 saniye içinde otomatik olarak kapanır.
- Parmağınızı doğru şekilde konumlandırın ve cihazı açmak için butona basın. İşlemi doğru yaptıysanız parametreler ekranda görünecektir.
- Parmak tipi pulse oksimetre aleti kullanımı esnasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına titizlikle dikkat edilmelidir.

CİHAZI TEMİZLİĞİ VE BAKIMI

- Nemli dezenfektanlı bir bezle silinerek temizliği yapılır.
- Fiziki temizliği yapılır. Çalışması kontrol edilir.

SORUMLULAR

- Genel -Temizlik Sorumlusu:** Sorumlu Hemşireler ve Doktorlar
- Bakım Sorumlusu:** Teknik Servis